

**Notice Remplacement
AGRAFES**




Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

L'agrafe (A) sert à protéger le câble intérieur du flexible. Ces agrafes sont moins solides que le câble et se cassent donc en cas de fortes tensions. Ce type de tension apparaît lorsque la tête diamantée ou le disque se bloque, généralement quand le cheval mord sur la fraise. Assurez-vous que le cheval ne morde pas la fraise, car cela n'abîme pas seulement l'instrument mais peut également entraîner de sérieuses blessures chez l'animal, comme par exemple des dents fracturées.

Assurez-vous également que l'agrafe (A) du flexible (2) se positionne bien dans la fente au bas de la fraise (1) quand vous connectez votre fraise à votre flexible.

Afin de garantir la compatibilité de nos instruments, le système d'agrafes se retrouve sur tout nos flexibles, même lorsque vous utilisez notre embrayage de protection pour flexible. Mais dans ce cas, les agrafes se cassent très rarement.

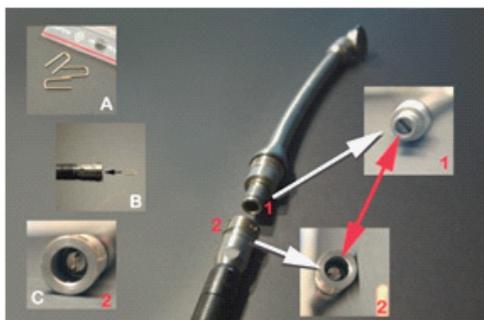

Si l'agrafe est cassée ou déformée, il convient de la changer :

Retirer l'ancienne agrafe, en prendre une nouvelle dans le sachet d'agrafes fourni et l'insérer dans la tête du flexible au niveau des 2 petits trous en utilisant une pince ou un petit davier. Contacter votre revendeur si vous avez besoin de sachets d'agrafes supplémentaires. Il existe deux types d'agrafes, celles en laiton plus souples conviennent aux fraises à axes (Maxillaire, Mandibulaire, etc.), celles en inox plus solides conviennent aux Flexxidisc et Polyfloat.

Parfois, l'écartement des pattes de l'agrafe est légèrement plus ou moins grand que celui des 2 trous dans lesquels il faut les insérer. Dans ce cas, n'hésitez pas à pincer ou écarter les pattes de l'agrafe.

Nous vous proposons également un outil special, le Quick Agrafes qui vous permettra de remplacer vos agrafes très facilement. De plus, il sert à stocker les agrafes. N'hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails.



Changement de l'agrafe avec une pince



Quick Agrafes

Pour plus de détails,
n'hésitez pas à visiter notre site web :

www.horse-dental-equipment.com



Horse Dental Equipment

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : horse@horse-dental-equipment.com

www.horse-dental-equipment.com