



Notice
Kit de Réparation
Fraises



Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

Réparation Fraises HDE

Outils à utiliser :

N°1



N°2



N°3



N°4



N°5



N°6




N°7



N°8



N°9

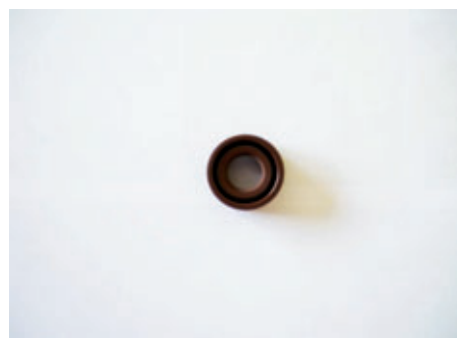

N°10



N°11



Etape n°1 :




Dévisser le bouchon côté flexible avec la clé N°1.

Dévisser la protection avec la clé N°2 ou N°3 en fonction de la fraise.

Se reporter en bas de page pour la fraise mandibulaire (F2)

Etape n°2 :

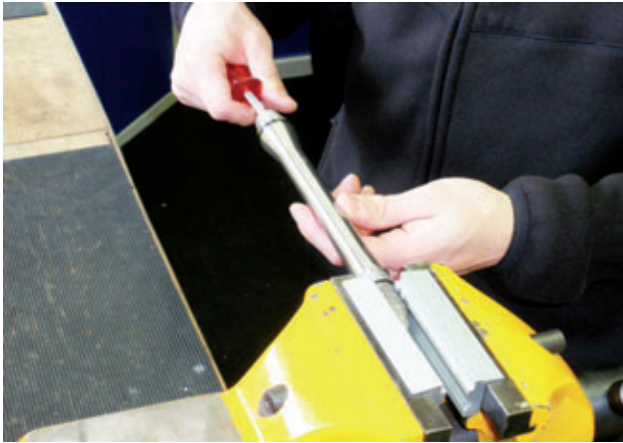

Bloquer la tête de fraise dans l'étau ou à l'aide d'une pince et dévisser la vis d'entraînement avec un tournevis plat.

Etape n°3 :



Sortir l'axe diamanté.


Spécificité F2 : Dévisser légèrement la protection, puis dévisser la vis d'entraînement tout en maintenant la tête de fraise grâce à un tournevis (grâce à une pince pour la fraise boule F4). Désolidariser l'ensemble, enlever l'axe puis la protection.

Etape n°4



Sortir le roulement côté flexible à l'aide de l'axe N°5.

Etape n°5 :

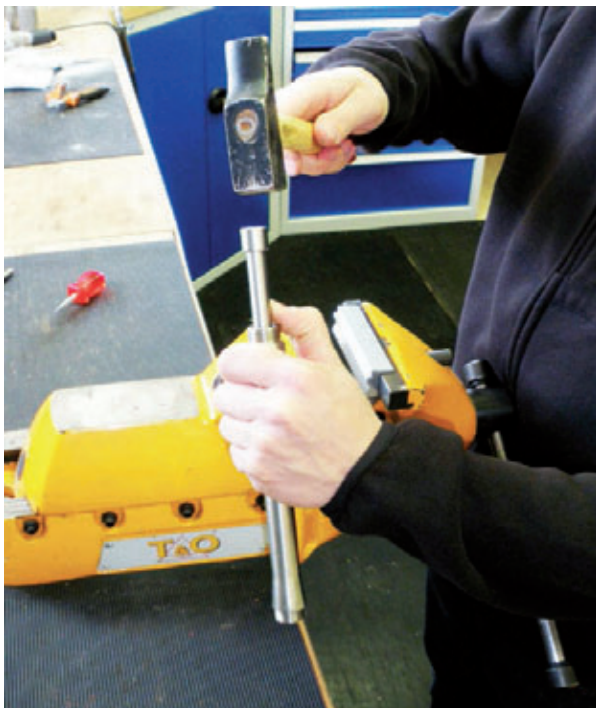

Sortir les deux roulements et le joint avec l'axe N°4.

Avant le remontage, nettoyer chaque élément.

Etape n°6 :



Mettre les deux roulements N°7 côté tête de fraise avec un peu de graisse N°10.

Puis poser le joint N°9 sur l'axe N°6. Le côté creux du joint doit être en contact avec les roulements. Fixer ensuite le joint sur les roulements grâce à un marteau.

Etape n°7 :



Ce joint permet de maintenir les roulements en place et assure l'étanchéité.

Etape n°8 :

Ensuite engager l'axe diamanté dans le corps. Mettre le roulement N°8 sur la vis d'entraînement. La visser sur l'axe diamanté avec un léger serrage.
Revisser le bouchon et la protection



Pour la fraise mandibulaire F2 et la fraise boule F4, vous devez enfilez la protection dans l'axe diamanté avant de le placer dans le corps.

Vous pouvez également voir en vidéo ces différentes étapes sur notre site internet:

www.horse-dental-equipment.com

Horse Dental Equipment

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : horse@horse-dental-equipment.com

www.horse-dental-equipment.com