



Notice Utilisation

Quick Agrafes



Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

Utilisation du Quick Agrafes

L'agrafe sert à protéger le câble intérieur du flexible. Ces agrafes sont moins solides que le câble et se cassent donc en cas de fortes tensions. Ce type de tension apparaît lorsque la tête diamantée ou le disque se bloque, généralement quand le cheval mord sur la fraise. Assurez-vous que le cheval ne morde pas la fraise, car cela n'abîme pas seulement l'instrument mais peut également entraîner de sérieuses blessures chez l'animal, comme par exemple des dents fracturées.

Assurez-vous également que l'agrafe du flexible se positionne bien dans la fente au bas de la fraise quand vous connectez celle-ci à votre flexible.

Afin de garantir la compatibilité de nos instruments, le système d'agrafes se retrouve sur tout nos flexibles, même lorsque vous utilisez notre embrayage de protection pour flexible. Mais dans ce cas, les agrafes se cassent très rarement.


Si l'agrafe est cassée ou déformée, il convient de la changer.

Etape n°1 :




Ecartez les 2 pattes de l'agrafe et insérez la dans la fente prévue à cet effet. (pattes vers l'extérieur).

Etape n°2 :

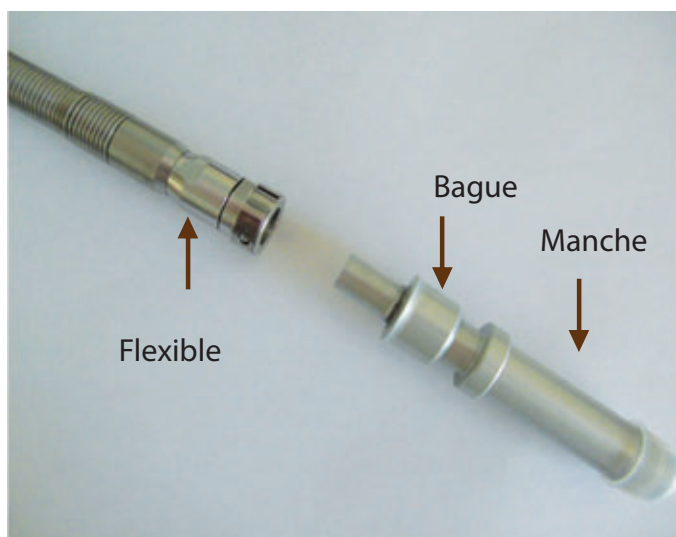

Positionner le Quick Agrafes tête vers le haut afin que l'agrafe ne tombe pas puis insérer le Quick Agrafes dans la tête de flexible.

Etape n°3 :

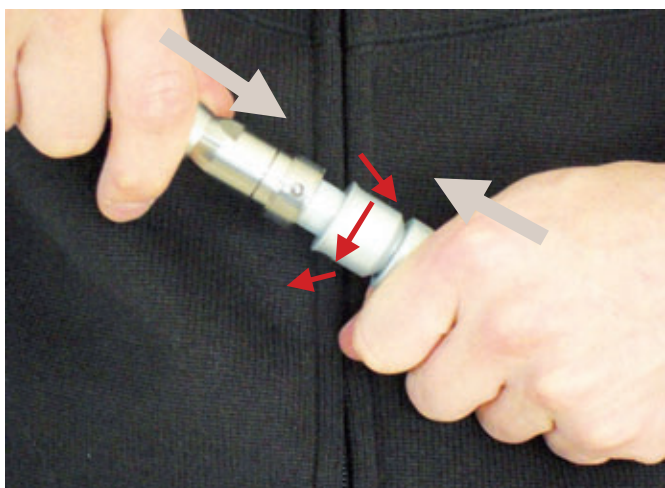

Exercer une pression à la fois sur le manche (attention à ne pas toucher la bague) du Quick Agrafes et la tête de flexible.

Etape n°4 :



Maintenez cette pression tout en tournant jusqu'à ce que la bague remonte et touche la tête de flexible.

Etape n°4 :



Retirer le Quick Agrafes : l'agrafe est maintenant insérée dans la tête de flexible.

**Vous pouvez également retrouver en vidéo ces différentes étapes
sur notre site internet: www.horse-dental-equipment.com**



Horse Dental Equipment

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : horse@horse-dental-equipment.com

www.horse-dental-equipment.com