



Notice Installation
EMBRAYAGES
Standard & Premium



Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

Quelques informations utiles



1. Deux jours sont nécessaires à la mise en route et au bon fonctionnement de l'embrayage. Pendant ce laps de temps, il est possible que vous ayez à changer votre agrafe à plusieurs reprises.

2. Assurez-vous que chaque pièce soit propre et bien sèche avant l'installation

3. Aucun entretien quotidien n'est nécessaire pour l'embrayage. Il est toute fois fortement conseillé de le renvoyer une fois tous les 6 mois chez Horse Dental Equipment pour une révision complète.

Version Standard



Version Premium

Installation de l'Embrayage Premium V2

Etape n°1 :



Fixez l'embrayage sur la fraise de votre choix, puis le flexible sur l'embrayage.


Etape n°2 :



Dans le cas où vous utilisez une fraise de taille moyenne, vous pouvez visser votre extension comme d'habitude directement sur la fraise.

Installation de l'Embrayage Standard V1

Etape n°1

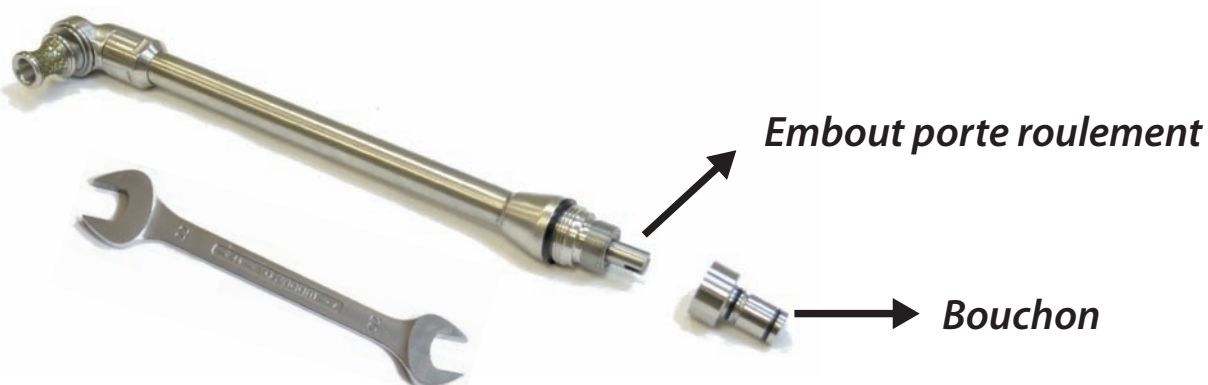

Dévissez le bouchon de votre fraise à l'aide d'une clé de 22 (non fournie)
Vous laissez ainsi apparaitre l'embout porte roulement sur lequel
vous allez fixer l'embrayage.

Etape n°2 :



Vissez fortement l'embrayage sur votre fraise avec une clé de 19
(non fournie).

Etape n°3 :



Revissez ensuite le bouchon sur l'embrayage.

Etape n°4 :



Pour fini, fixez votre flexible sur le bouchon comme habituellement puis vissez l'extension si nécessaire.



Ne pas plonger l'embrayage dans l'eau

Vous pouvez également voir en vidéo les différentes étapes d'installation de l'embrayage sur notre site internet: www.horse-dental-equipment.com

Horse Dental Equipment

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : horse@horse-dental-equipment.com

www.horse-dental-equipment.com