



**HORSE DENTAL
EQUIPMENT**

Power Equipment
Designed for Equine Dentistry

HDE
Horse Dental Equipment
Châteaubourg (35)
FRANCE

Tél : 02 99 00 71 29
www.horse-dental-equipment.com

AMÉRIQUE
HDE North America Ltd.
Houston (TX)
USA

Tél : 713-444-2531
www.horse-dental-equipment.us

FLEXXIDISC

Notice d'utilisation

www.horse-dental-equipment.us

Précautions

- @age d'Wa _ _ S` Va` e Sg _ a[e g` Wcäh[e]a` bSdS` ag fage 'Vé' ' " UZVMSgj
- 5 WbcaVg[f` iVéf bSe VVéf[ä à ViSgfdVé geSYVé
- FagfW[hVthW fja` egd`S fáfWWS 8>7JJ;6;E5 S` `g`WS YScS` f[W

@Yg`X|ZzfYblg'a cX,`Yg

| Modèle | Courbe twist | Droite | Longueur (cm) |
|----------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Longue | ✓ | ✓ | 54 |
| Standard | ✓ | ✓ (avec ou sans extension) | 32 |
| Courte | (avec ou sans extension) | ✓ | 18 |

Pour toute demande, merci de contacter
votre centre technique HDE France

Différents modèles adaptés à votre pratique



www.horse-dental-equipment.com

9HdYn°1



Prendre d'une main la tête et la bague et tirer fort vers l'extérieur.

9HdYbš &



Tourner puis relâcher

9HdYbš'



La tête est correctement positionnée dès lors qu'elle atteint l'encoche et que vous entendez un clic.

: fUlgYgXjUa UbhfYg

1. ? VffrdWW _ SdJZWW_ afVgdVW`S XŠ[eW
2. Dg` [f Sf Z[YZ ebVWW i [fZ fZWZVŠV ba[f[Y Vai ` fa dV_ ahWS` k dV_ S[[Y i SfVŠ
3. 3bb [cgVŠ`S TðeeW[aj : 67 egd`S fáfWW[S_ S` fäWWW Xä` Uf[a` ` W_ Wf
4. Bagðeg[hndWgecgrä ä` [Sff`a` Ua_ b`çfWWg Väbi f VWWW f[W
5. @VffakVŠShWU g` UZ[Xä` [T[Tä ViVŠg U`S[dWW` Vig` bçVg[f Væ[XWfS` f
6. 4[W eäUZVŠShWU g` UZ[Xä` Vagj W bçbdW
7. DS` YVŠ`S XŠ[eWä ↑WVç[f bçhng VS` e hafdW_ S`VffWbçbdWV eçUZW

La fraise est résistante aux projections d'eau, ne pas immerger dans l'eau
Utiliser de l'eau claire sans produit corrosif ni détergent
Utiliser uniquement la brosse inox HDE



: `YI J VYg

- 1 - Nettoyer la gaine extérieure avec une éponge humide
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 3 - Détacher le flexible du moteur et de la fraise en fin de travail
- 4 - Ranger le flexible dans votre vallette propre et sèche

Bien veiller à ne pas imprimer un rayon de courbure excessif sur le flexible

MotYi f

- 1 - Mettre le moteur hors tension
- 2 - Nettoyer le moteur avec une éponge humide
- 3 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 4 - Ranger le moteur dans votre vallette propre et sèche

A U`YHhY{ `jbgfi a Yblg

- 1 - Nettoyer la vallette avec une éponge humide
- 2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
- 3 - Stocker dans un endroit propre et ventilé

Bien veiller à ouvrir la vallette de temps en temps, afin d'assurer une bonne ventilation de votre matériel

Avantage n° 1



Un nivellement efficace des surdents grâce à son disque diamanté.

Avantage n° 2



Le faible diamètre de la tête et du corps permet un meilleur accès en fond de bouche.

La forme courbe permet une meilleure visibilité du disque lors du nivellement, tout particulièrement en partie vestibulaire.

Avantage n° 3



La poignée en caoutchouc assure une excellente prise en main et un confort optimale.